

Anleitung für das sichere Verschließen von medizinischen Abfallbehältern



Deckel genau auf den Behälter setzen



Lange Seite kräftig festdrücken



Nun auch die kurzen Seiten kräftig andrücken



Ecken jeweils kreuzweise kräftig andrücken

Hinweise:

- Der Deckel ist richtig und fest verschlossen, wenn alle Zähne des Deckels eingerastet sind
- Stellen Sie sicher, dass der Behälter sowie der Deckel frei von Schäden sind
- Bitte denken Sie an das ordnungsgemäße Deklarieren Ihrer Behälter